

# CÓMO USAR



**“NEOHEAL”** apósito estéril de **HIDROGEL** médico para el tratamiento profesional de heridas en **ambiente húmedo** en las:

Pag. 1/3 Agosto-2016

- quemaduras
- ulceraciones
- úlceras por presión
- otras heridas crónicas, por ejemplo, pie diabético, epidermolisis bullosa
- abrasiones y daños en la capa epidérmica de la piel

## DESCRIPCIÓN del PRODUCTO

El apósito estéril NEOHEAL crea un **ambiente húmedo** en la superficie de la piel donde se aplique, ayuda en la limpieza autolítica de tejidos muertos, y ejerce una influencia positiva en los procesos de granulación y creación de epidermis de la herida. El apósito se adhiere bien a la superficie de la herida pero no es adhesivo; por tanto, la aplicación y la retirada del apósito es indolora. NEOHEAL absorbe el exudado de las heridas y lo atrapa, junto con las bacterias, en su propia estructura.

El apósito es elástico, blando y flexible, y permite cubrir cualquiera partes del cuerpo aunque sean difíciles, tales como la cara, manos y las zonas alrededor de las articulaciones.

El apósito NEOHEAL es **transparente**, permitiendo la observación de la zona de la herida en el apósito primario y reduce al mínimo la frecuencia de cambio de apósitos. Gracias a sus propiedades puede ser utilizado como un apósito secundario para muchos medicamentos y preparaciones colocándolo directamente sobre la herida.

La estructura única del apósito crea una barrera a las bacterias externas, y permite que la piel **“respire”**.

El alto contenido de agua del apósito proporciona **cualidades calmantes y refrescantes** en casos de quemaduras superficiales y en la hinchazón causada, por ejemplo, por las picaduras de insectos u otros. El apósito es hipoalergénico.

## INDICACIONES

### TRATAMIENTO de QUEMADURAS

Las superficies de la piel dañadas por altas temperaturas deben ser enfriadas con agua fría lo más rápidamente posible por un periodo de 15 minutos. A continuación, cubrir con el apósito NEOHEAL. El tratamiento posterior depende de la profundidad y magnitud de las quemaduras. Cambiar el apósito es fácil y sin dolor porque NEOHEAL, a diferencia de los apósitos tradicionales, no se adhiere a la herida. Para evitar que el apósito se seque demasiado rápidamente, una capa de gasa humedecida con una solución salina estéril se puede colocar en la superficie externa del apósito para mantenerlo húmedo más tiempo.

### QUEMADURAS de PRIMER GRADO y QUEMADURAS SOLARES

En quemaduras que causan enrojecimiento de la piel y sensibilidad local o dolor, sin daños visibles en la piel, es muy importante cubrir la piel tan pronto como sea posible con NEOHEAL. De esta manera el área quemada se enfría e impide la aparición de ampollas. NEOHEAL asegura un intercambio adecuado de calor y el equilibrio de la humedad, así como una barrera efectiva contra la infección externa. En los primeros días de tratamiento el apósito debe cambiarse cada 12-24 horas.

### QUEMADURAS de SEGUNDO y TERCER GRADO

Las quemaduras de segundo y tercer grado deben cubrirse lo más rápidamente posible con apósitos NEOHEAL y buscar atención médica inmediatamente. Los apósitos NEOHEAL enfrían el área dañada, alivian y calman el dolor y la protege contra la infección. La aplicación de NEOHEAL facilita la eliminación autolítica del tejido necrótico. La duración media del tratamiento con el apósito NEOHEAL es un 50% menor que con apósitos tradicionales. Los apósitos NEOHEAL deben utilizarse hasta que una superficie seca del apósito sea visible, y observar que la epidermis está creciendo de manera uniforme. Si aparecen ampollas en los dos primeros días del tratamiento deben ser eliminadas y continuar el tratamiento con NEOHEAL.

## ULCERACIONES

NEOHEAL mantiene un **ambiente húmedo** en la superficie de la ulceración, previniendo el secado de la herida y el vertimiento de fibrina. De esta forma NEOHEAL estimula la limpieza autolítica de la herida y la posterior granulación y creación de epidermis en la superficie de la ulceración. El apósito NEOHEAL puede ser aplicado en el tratamiento de úlceras vasculares en combinación con la terapia de compresión. La aplicación de la terapia de compresión no tiene influencia significativa en la absorbencia del apósito. La frecuencia de cambios del apósito depende del volumen de exudados, más frecuentemente cerca de 1-3 días. En el caso de

ulceraciones causadas por un trastorno en el flujo sanguíneo arterial debido a la aterosclerosis, la terapia de compresión no debe ser practicada. Proceda como con otras ulceraciones.

### ÚLCERAS POR PRESIÓN

El apósito NEOHEAL también se puede aplicar en el tratamiento de las úlceras por presión en diversas etapas de la curación. En el caso de las úlceras por presión necróticas, el apósito facilita la limpieza autolítica de la herida. En el caso de necrosis el apósito NEOHEAL puede ser utilizado como un apósito secundario con enzimáticos, germicidas y líquidos hidrogeles colocados directamente sobre la herida. En esta situación, se recomienda mantener el apósito sobre la herida no más de 24 horas. En caso de que las heridas estén ya libres de necrosis y las escaras superficiales no excedan el espesor total de la piel, el tratamiento es el mismo que para la ulceración.

### ATENCIÓN

El apósito NEOHEAL no se recomienda para las heridas con una gran zona de reblandecimiento por necrosis con signos de infección, o con un gran volumen de exudado o con contenido purulento. En tales casos es necesario limpiar la herida quirúrgicamente antes del tratamiento con NEOHEAL.

### INSTRUCCIONES de USO

El apósito NEOHEAL se suministra en un molde de plástico del tamaño de apósito seleccionado, cubierto con una lámina transparente, y sellado de forma hermética en un envase estéril. Si el envase ha sido abierto o dañado, el apósito no debe utilizarse. Para usar el apósito rasgar el envase a lo largo de la línea indicada por una muesca situada en el sellado, cerca de una esquina. A continuación, cogiéndolo por la etiqueta de tejido blanco que el apósito lleva incorporada saque el apósito del molde, junto con la lámina transparente. Aplicar el apósito en reposo, sin estirarlo, a la herida y una vez aplicado retirar la lámina transparente. La etiqueta de tejido blanco pegada a la parte externa del apósito facilita la retirada de NEOHEAL de su molde y evita tocar el apósito y contaminarlo. Después de la aplicación de NEOHEAL a una herida el apósito debe ser asegurado a la zona afectada del paciente, con cinta adhesiva transpirable, con una lámina de poliuretano transpirable de manera que la herida quede cubierta en su totalidad y el apósito cubra la piel aproximadamente 2 cm alrededor de la herida, o con un vendaje tubular de malla o de baja compresión. El apósito, no debe ser estirado mientras se coloca sobre la herida y debe adherirse a la piel sana alrededor de la herida solapándola unos 2 cms. En ocasiones que lo requieran, el apósito podría graparse al paciente.

### FRECUENCIA del CAMBIO de apósito

La duración recomendada de la aplicación de NEOHEAL a una herida es de hasta 48 horas. La frecuencia requerida de cambio depende del volumen de exudado creado por la herida. En el caso de heridas superficiales con muy poco exudado, es posible prolongar el uso del apósito. Para evitar que el apósito se seque demasiado rápido, puede cubrirse con gasas empapadas con solución salina. Para facilitar el retirar un apósito que se ha secado y pegado sobre la herida, cúbralo con compresas de gasa empapada en solución salina, hasta reblandecerlo de nuevo, lo que hace que el apósito se hinche y humedezca y facilita su retirada de la herida. Cuando cambie el apósito NEOHEAL la herida debe ser enjuagada con solución salina y limpiarse con soluciones especialmente diseñadas para la descontaminación de heridas.

Dependiendo del tipo de herida y la etapa de tratamiento, el grado de adhesión de NEOHEAL a la superficie de la piel y la herida está sujeto a cambios. La capacidad del apósito para absorber el exudado fluctúa alrededor de 20 ml por cada 100 cm<sup>2</sup> de apósito.

### OBSERVACIÓN de la HERIDA a TRAVÉS del APÓSITO

La transparencia de NEOHEAL se aprovecha plenamente durante el proceso del tratamiento. NEOHEAL permite la observación de la herida minimizando la frecuencia de los cambios del apósito. Durante períodos de uso del apósito de hidrogel más largos, la piel alrededor de la herida puede llegar a ser macerada. En tales casos, los bordes de la herida deben ser protegidos con, por ejemplo, ungüento de zinc. Un exudado ligero absorbido por el apósito lo irá amarilleando y perderá lentamente la transparencia original.

### ALMACENAJE

El apósito NEOHEAL puede guardarse a una temperatura de entre 0° a 25° C. Guardar en frigorífico a 8° C para incrementar y prolongar las propiedades refrescantes y calmantes del apósito.

### ATENCIÓN

Si no se utiliza, un apósito una vez retirado de su embalaje ya no está estéril y no se debe utilizar. El apósito NEOHEAL es desechable, una reutilización no está permitida, para evitar contaminación de la herida.



AGENTE exclusivo para España:



[www.apositosdehidrogel.com](http://www.apositosdehidrogel.com)


Tel. 635 84 84 07

eMail: [info@apositosdehidrogel.com](mailto:info@apositosdehidrogel.com)

Badalona

El apósito puede fijarse al paciente con:

- 1) un film adhesivo de poliuretano
- 2) un vendaje de malla
- 3) una venda
- 4) un tubular de baja compresión

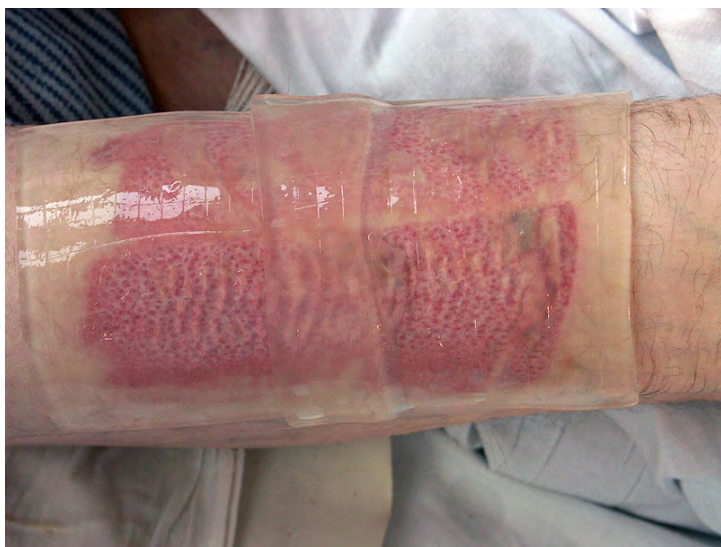

Los apósitos de Hidrogel pueden colocarse de forma solapada, en caso necesario

Hay disponibles apósitos de gran formato:

- .- 22 x 28 cms
- .- 20 x 40 cms
- .- 40 x 60 cms

