



Tattoos

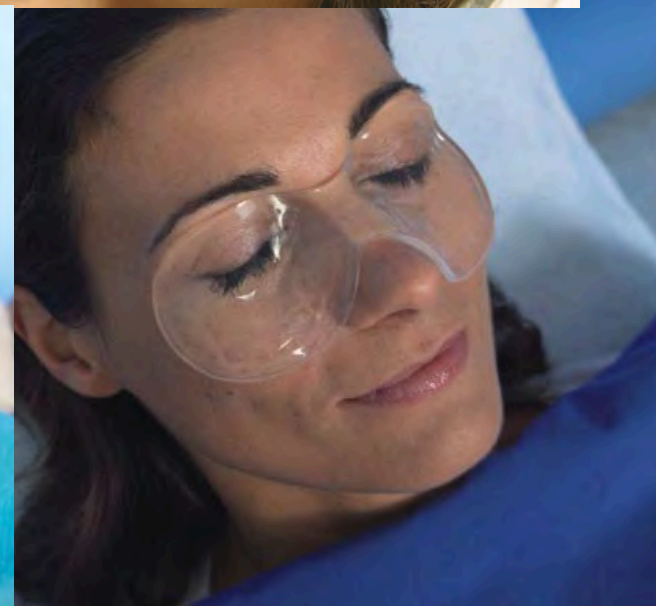

Tratamientos por **LASER**

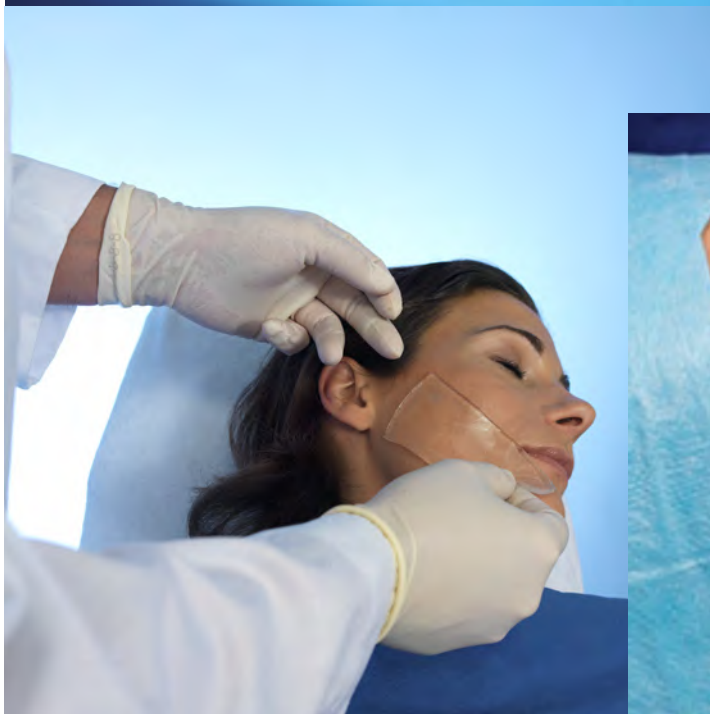

Indicaciones:

Procedimientos médicos con laser no ablativos, y dermo-cosméticos (ejemplos: nevus, telangiectasia, cuperosis) En lesiones pigmentadas, tattoos y depilación por sistemas laser de pulso corto o largo, fuentes de luz IPLs y otras, ejemplo: YAG, DIODE, RUBY, ALEXANDRITE, KTP, ARGON, y laser decolorante.

La alta calidad del apósito **HYDROAID**, su transparencia, su blandura, adecuada adherencia y adaptación a la forma de la zona a tratar , pretende ofrecer una excelente solución y se ajusta a las necesidades durante y después de un procedimiento por laser. Fácil de usar y con la posibilidad de re-refrigerar repetidas veces, es la mejor alternativa a otros procedimientos o dispositivos.

Agente para España:

www.apositosdehidrogel.com tel 635 84 84 07 email: info@apositosdehidrogel.com

pag. 3/3

Enfria / Refresca:

El apósito **HYDROAID** es percibido en la mayoría de pacientes como refrescante y calmante, además de reconocer un efecto de alivio del dolor.

Cuida la piel

A través de la refrigeración fisiológica suave ofrecida por Hydroaid, la piel no muestra una reacción defensiva o de shock. Esto permite a la luz del laser penetrar en las zonas donde se necesita ejercer sus efectos, durante toda la sesión de tratamiento. El poder de enfriamiento incluso en extensas zonas de la piel previene la formación de eritemas, vesículas, costras e incluso dolor, optimizando el tratamiento y los resultados.

Transparencia

Hydroaid aporta transparencia debido a su alto contenido de agua y estructura homogénea. Aporta transparencia epidermal y mejora la visibilidad de las estructuras de la piel. Además aumentando el contenido de agua en el estrato córneo, se elimina el aspecto de corneocitos escarchados emitidos. La dispersión de la luz del laser se reduce asegurando una mejor entrega de energía al objetivo.

Favorece la visibilidad del objetivo

Hydroaid favorece el efecto diascopia. Resultando una mejora de la visibilidad permite un tratamiento más eficiente en el objetivo, el cual permanece optimamente identificado durante todo el procedimiento.

Hydroaid protege la piel

El apósito de hidrogel Hydroaid a sido específicamente desarrollado para las aplicaciones médicas por láser. El material ha sido extensamente testado de acuerdo a la actuales regulaciones. Es totalmente biocompatible, bien tolerado y protege la piel de los efectos secundarios inducidos por el laser.

Hydroaid cuida de las salpicaduras y humos

El apósito cubre óptimamente la piel, previene al paciente y al personal de olores desagradables, y de los restos de piel y humos emitidos, que pueden tener partículas potencialmente infecciosas.

Se adapta a la anatomía

El apósito de hidrogel Hydroaid es blando, y toma la forma de la zona a tratar, especialmente para terapias de laser en zonas difíciles (cara, axilas, bikini) especialmente donde otros sistemas de geles provocan un procedimiento desagradable.

Fácil de manipular

Basado en la recomendación "**un apósito = un procedimiento**" la manipulación del apósito es conveniente para el paciente y el personal. El apósito puede retirarse de un área y usarse en otra del mismo paciente, sin problema. El apósito puede incluso humedecerse externamente para facilitar el movimiento y desplazamiento del cabezal laser.